


STRAHLENSCHUTZABDECKUNG (SINGLE USE)

BILÄRE VORGÄNGE

Art. Nr. SA-BSS

Dämpfung:	> 92% bei 90 kVp
Bleigleichwert:	> 0,25mm
Material:	Bleifrei
Größe:	ca. 30 x 43 cm
Anwendung:	Biliäre Vorgänge wie Biopsien, etc.
VK-Einheit:	Set à 15 Stck.

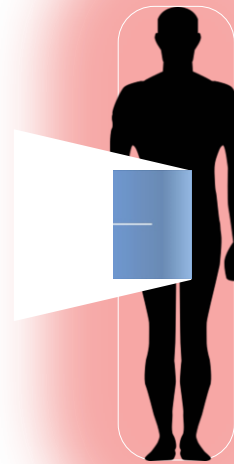

Verwendung:

1. Aus dem Beutel entnehmen, ohne die Sterilität zu beeinträchtigen.
2. Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Patienten.
3. Nicht im direkten Strahlengang positionieren.
4. Nutzen Sie die Abdeckung so, dass sie zwischen dem Direktstrahl und dem Arzt oder Techniker liegt, um den Sicherheits Schatten zu maximieren.
5. Sichern Sie die Abdeckung in der richtigen Position mit einem Klebestreifen. Kleben Sie nicht direkt auf die Haut des Patienten.

Hinweise:

Das Produkt ist steril, es sei denn, die Verpackung wurde geöffnet oder beschädigt.

Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder nicht steril ist !

Nur zusätzlich zu den routinemäßigen Strahlenschutzmaßnahmen verwenden, nicht anstelle der üblichen Schutzmaßnahmen.